


¿Cómo limpiamos nuestro autoclave?

Siempre seguir las recomendaciones del fabricante del equipo!!!!



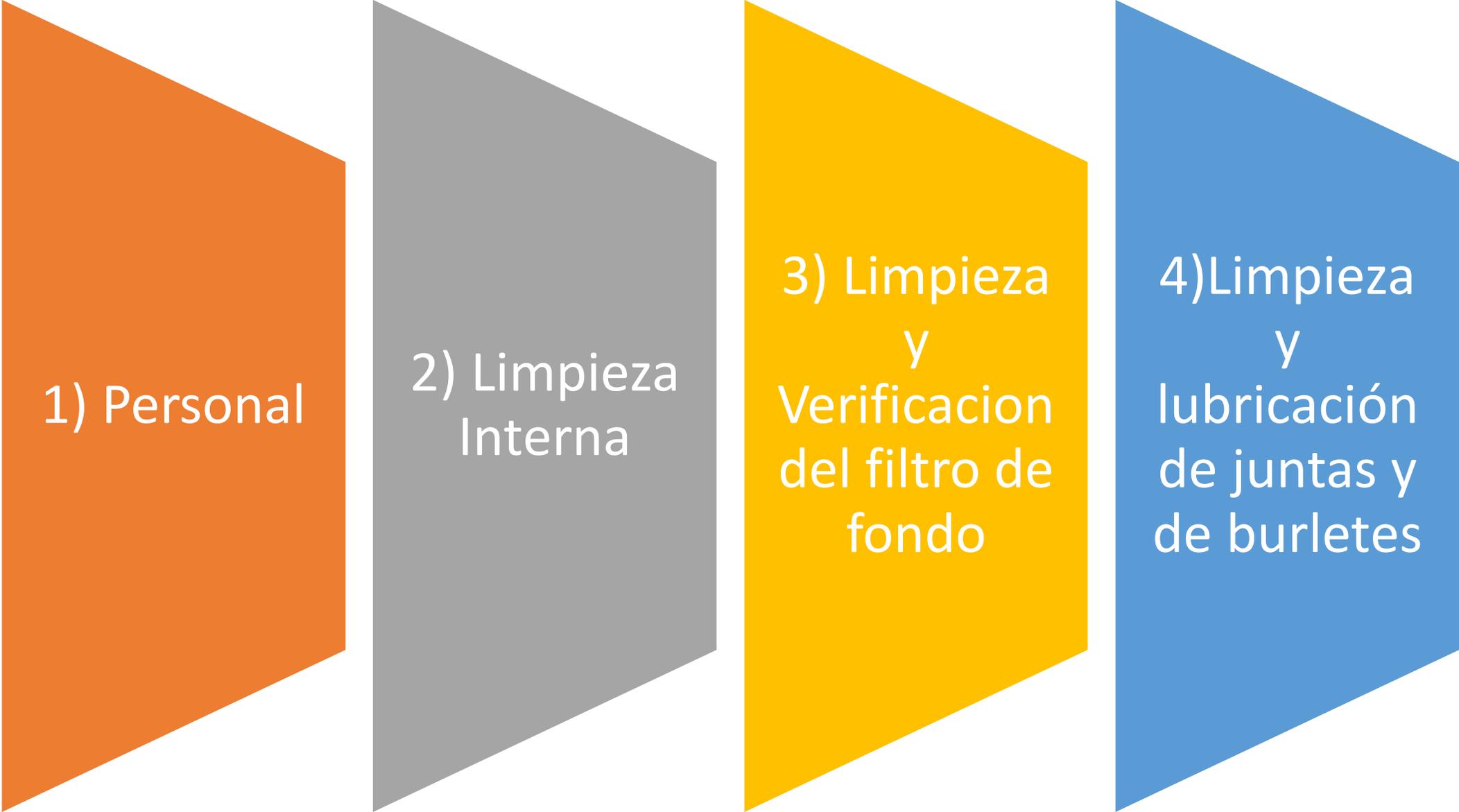

1) Personal

2) Limpieza
Interna

3) Limpieza
y
Verificación
del filtro de
fondo

4) Limpieza
y
Lubricación
de juntas y
de burletes

1) Personal



1. El personal de limpieza involucrado debe estar debidamente entrenado en la limpieza de equipos y zonas adyacentes.
2. Preferiblemente personal de la central de esterilización, en lugar de personal de limpieza externo que no conoce los equipos.
3. Debe llevar ropa adecuada para su labor y elementos de protección personal (guantes de uso doméstico, antiparras y delantal cubriendo antebrazos y codos)
4. El pelo debe estar recogido y cubierto con gorro.
5. Debe llevar calzado antiestático y antideslizante.
6. Debe evitar el uso de pulseras, joyas, pendientes, relojes, etc.

2) Limpieza interna de la cámara



1. Apague el equipo y verifique que la cámara y doble pared se encuentren sin presión (observando el manómetro de cámara y doble pared). El autoclave debe estar frío.
2. Frote con un paño mojado en agua toda la superficie de la cámara a efectos de humedecerla.
3. Pase un paño embebido con el limpiador sugerido por el fabricante del equipo y seguir las indicaciones del producto de limpieza.
4. Observe si hay presencia de puntos negros en la superficie y elimine mediante la limpieza.
5. Enjuague la superficie con un paño mojado.



3) Limpieza y verificación de filtro de fondo

1. Verifique que el equipo se encuentre apagado y frío.
2. Retire manualmente el filtro de fondo tomándolo del perno que posee y jalándolo hacia arriba.
3. Lave con detergente y agua caliente.
4. Enjuague con abundante agua .
5. Reinstale el filtro en su lugar, en el piso de la cámara.

Filtro de fondo

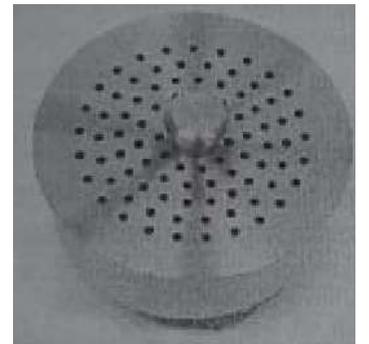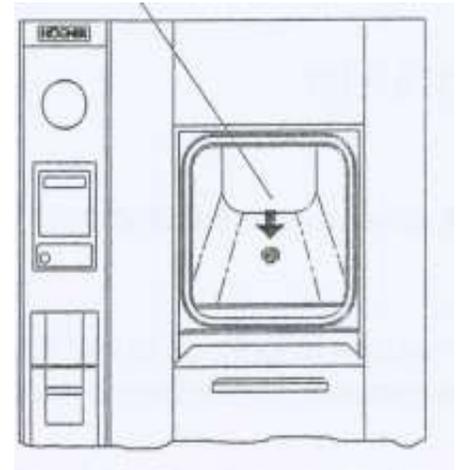


4) Limpieza y
lubricación de
juntas de puertas




4) Limpieza y lubricación de juntas de puertas

1. Verifique que el equipo se encuentre apagado y frío.
2. Retire la junta de su alojamiento, utilizando la herramienta provista por el fabricante.
3. Limpie la junta con alcohol isopropílico al 99%, eliminando la suciedad. Dejar secar.
4. Verifique que la junta se encuentra en buenas condiciones, libres de cortes, deformaciones y perforaciones.

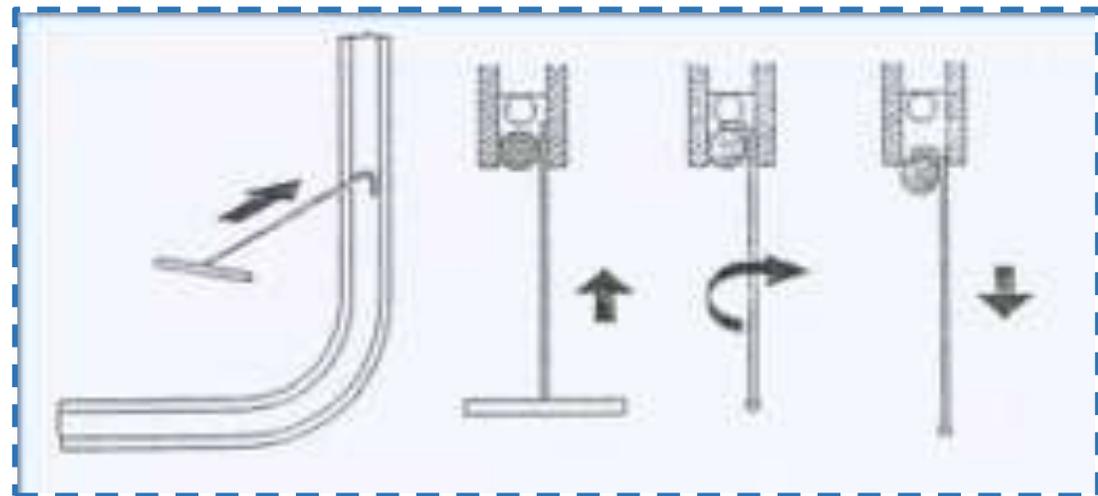

4) Limpieza y lubricación de juntas de puertas

5. Limpie el alojamiento de la junta con un paño mojado con alcohol isopropílico. Deje secar.
6. Lubrique el alojamiento con un lubricador siliconado, provisto por el fabricante.
7. Coloque la junta observando que la unión donde esta pegado de fábrica el burlete, no quede colocada en ninguno de los 4 ángulos de la cámara, esto podría forzar la unión durante el funcionamiento del autoclave y acabar por despegarla.

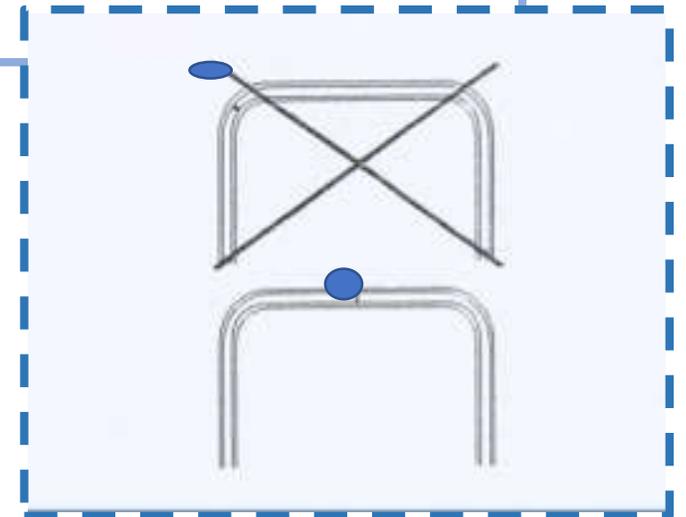



No utilicé el equipo con la junta sucia o sin lubricación, esto puede ocasionar que funcione incorrectamente la apertura y cierre de la puerta o **falle la hermeticidad!!!!!!**



AAFH-EH

**ESTERILIZACIÓN
HOSPITALARIA**

EH